



Medizinprodukte in der Pflege – Rollatoren anwenden

Herzlich willkommen zur Schulung!

Thema: Rollatoren anwenden

Dauer: ca. 10 Minuten

Ziel: Was müssen Sie bei der Anwendung von Rollatoren beachten?

Inhalt:

- 1 Rollatoren als Medizinprodukte
- 2 Maßnahmen zur Sicherheit
- 3 Worauf Sie achten müssen
- 4 Nicht vergessen
- 5 Fragen zur Wiederholung

Rollatoren sind Medizinprodukte:

- ◆ Rollatoren sind heute ein **gängiges** Medizinprodukt, wenn es darum geht, Menschen mit Gehbehinderungen wieder einen gewissen Grad an Bewegung zu ermöglichen.
- ◆ Der **Vorteil eines Rollators** ist, dass Patienten sich aufstützen, kleine Einkäufe transportieren und des Weiteren ihn auch als kurzfristige Sitzgelegenheit (wenn dies der Hersteller vorsieht) benutzen können.
- ◆ Dadurch, dass die Produkte heute auch oft faltbar oder zumindest zusammenklappbar sind, können sie auch einfach verstaut oder transportiert werden.

Rollatoren und Delta-Gehräder

- ◆ **Rollatoren** sind **vierrädrige** Gehhilfen.
- ◆ **Dreirädrige** Gehhilfen werden dagegen als **Delta-Gehräder** bezeichnet.
- ◆ **Delta-Gehräder** haben aufgrund ihrer geringeren Standfläche gegenüber Rollatoren wesentlich weniger Unterstützungsmöglichkeiten und stellen **keinen Ersatz für Rollatoren** dar.

Sicherheitsmaßnahmen

- ◆ Der Rollator darf nur bei **angezogenen Bremsen als Sitzhilfe** genutzt werden.
- ◆ Nutzen Sie den Rollator **niemals als Rollstuhlersatz!**
- ◆ Eine **falsche Einstellung der Griffhöhe** führt dazu, dass der Patient entweder den sicheren Standbereich zwischen den Rädern des Rollators verlässt oder sich in Gefahrensituationen nicht effektiv aufstützen kann.
- ◆ **Prüfen** Sie daher stets die **korrekte Einstellung der Griffhöhe**.
- ◆ **Reinigen und desinfizieren** Sie Rollatoren, die von mehreren Patienten benutzt werden, bei jedem Patientenwechsel.

Bei der Verwendung dieser Medizinprodukte zu beachten:

- ◆ Beachten Sie auch bei Rollatoren die Angaben der **Gebrauchsanweisung** und der Kennzeichnung der Produkte sowie die Maßnahmen zur hygienischen Sicherheit.
- ◆ Überprüfen Sie jeden Rollator auf **Schäden**, **bevor** der Patient ihn benutzt.
- ◆ Insbesondere die **Handgriffe** von Rollatoren sollten, wenn sie von mehreren Patienten verwendet werden, regelmäßig bei einem Patientenwechsel mit einer **Wischdesinfektion** gereinigt werden.

Bei der Verwendung dieser Medizinprodukte zu beachten:

- ◆ Die Produkte sind **nicht** im Bestandsverzeichnis und **nicht** im Medizinproduktebuch zu führen.
- ◆ Alle **Einweisungen** von **Anwendern** am Produkt werden in deren Personalakte **dokumentiert**.
- ◆ Die **Einweisung** des **Patienten** ist ebenfalls zu **dokumentieren** und in der Patientenakte ist das neue Hilfsmittel zu vermerken.
- ◆ **Meldung** aller **Vorkommnisse** und **Beinahe-Vorkommnisse** erfolgen immer an das **BfArM**.
- ◆ Es gibt auch **Rollatoren**, die **elektrisch** unterstützt werden. Dieses Produkt wäre dann im **Bestandsverzeichnis** zu führen.



Wichtig:

Beachten Sie immer die Angaben der Gebrauchsanweisung!



Wichtig:

Überprüfen Sie regelmäßig den Rollator auf sichtbare Beschädigungen, insbesondere die Räder und Bremsen!



Wichtig:

Benutzen Sie den Rollator nie als „Rollstuhl“ oder als „Transportwagen“!



? Frage 1:

Können Rollatoren als Sitzhilfe genutzt werden?



? Frage 2:

Was müssen Sie nach dem Zusammenfalten bzw. -klappen immer kontrollieren?



? Frage 3:

Müssen Sie in Rollatoren eingewiesen werden?





Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!